
ELPS用製品ラインアップ 非医療機器製品

喉頭鏡ホルダー支持台 ラリンゴ用

〈非医療機器〉 10338700

● 喉頭鏡ホルダーを支持するための台です。

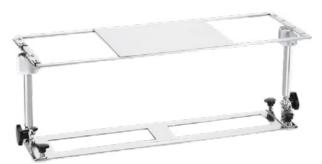

サイズ:(W)700×(D)225×(H)250~300mm



ELPS 用製品の紹介動画はこちら https://youtu.be/lkFsy5pN3YY



喉頭鏡ホルダー斉藤氏

〈非医療機器〉 10338400

- 喉頭鏡をホールドすることにより、患部の視野確保のサポートができます。
- ハンドルによって下咽頭部位を展開することができます。

滅菌コンテナ

〈非医療機器〉

ELPS 基本セット用 80410037


サイズ:(W)597×(D)279×(H)102mm

ELPS 基本セット用 鉗子トレイ付 80410038

サイズ:(W)597×(D)279×(H)203mm

- ELPS製品をまとめて滅菌することができます。
- セットして収納することも可能です。



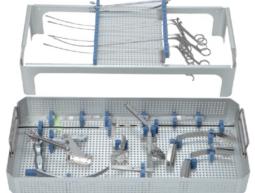

SINCE 1910

☞ 永島医科器械株式会社

URL https://www.ent1910.co.jp/

[本 社]〒113-0033 東京都文京区本郷 5-24-1 TEL(03)3812-1271(元)FAX(03)3812-1323 [東京支社]〒113-0033 東京都文京区本郷 5-3-4 TEL(03)3812-1271(元)FAX(03)3816-2824 [名古屋営業所]〒460-0013 名古屋市中区上前津 2-13-21 1F TEL(052)331-3325 FAX(052)331-3326 [大阪営業所]〒541-0055 大阪市中央区船場中央 2-1-4-315 TEL(06)6484-6123 FAX(06)6484-6122 [九州営業所]〒802-0001 北九州市小倉北区浅野 1-2-39-802 TEL(093)342-8526 FAX(093)342-8527



2507-01-K04



開口器付 口腔咽喉頭直達鏡

形状:佐藤式 彎曲型

- 鏡筒部が彎曲しているため歯牙・顎関節・頸椎への負担を 軽減しつつ、中下咽頭・喉頭の良好な視野とワーキングスペースが 確保できます。
- 可動式開口フレームによって口腔・中咽頭の視野が改善され、 肉眼直視下での扁桃摘出術でも扁桃下極までの良好な視野が 提供できます。
- 開口器が調節レバーを装備しているため鏡筒部の挿入深さを 任意に調節でき、調節レバーを回すことで容易に微調節ができます。
- 経鼻内視鏡や上部消化管内視鏡を使用することで、 より確実な診断・手術(ELPS・ESD・EMR)ができます。



取扱説明画像




商品コード: 10349000

販売名	開□器付□腔咽喉頭直達鏡
一般的名称	開孔器
リスク分類	一般医療機器
特定保守管理医療機器 該当の有無	非該当
設置管理医療機器 該当の有無	非該当
届出番号	13B1X00138SA0395

咽喉頭直達鏡

特徵 形状:佐藤式 彎曲型

●上部消化管拡大内視鏡等を併用することで、 より確実な診断・手術(ELPS・ESD・EMR)ができます。

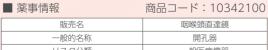

--船医睿機器 リスク分類 特定保守管理医療機器 該当の有無 非該当 設置管理医療機器 該当の有無 非該当 13B1X00138SS002



有効長:145mm

専用舌圧子は下記のとおり

- ·ELPS用舌圧子 長 10343301
- ·ELPS用舌圧子 短 10343300

ELPS用製品ラインアップ


リスク分類	一般医療機器
特定保守管理医療機器 該当の	有無 非該当
設置管理医療機器 該当の有	無 非該当

〈医療機器共通〉

彎曲鉗子

一般的名称:鉗子 届出番号:13B1X00138SK0032

- ELPS用麦粒状鉗子は、表皮癌組織の生検摘出に有効な把持鉗子です。
- ELPS用段状鉗子は広範囲な病変組織を、剥離及び摘出する時の把持鉗子です。

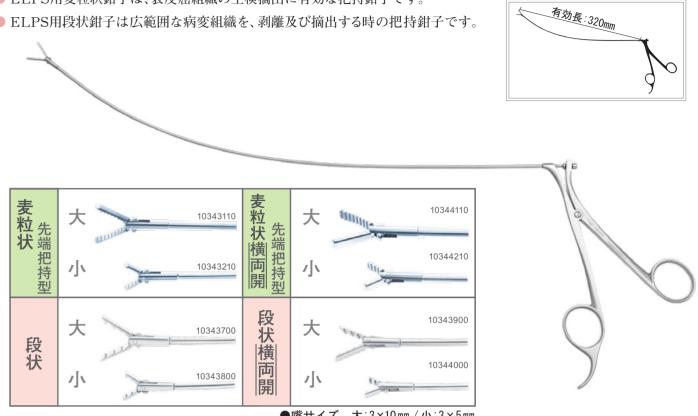

●嘴サイズ 大:3×10 mm / 小:3×5 mm

【注意】表在癌組織標本の採取時は、レーザー及び鋭い鈎状鉗子では標本組織を破損する場合があります。

ELPS用舌圧子

一般的名称:舌圧子

届出番号:13B1X00138050042

有効長:150mm

● 舌を保護しながら咽喉頭直達鏡を スムーズに挿入できます。

開口器付直達鏡用 長 10343311

開口器付直達鏡用 短 10343310

ELPS用ガイド管

一般的名称:ガイド

届出番号:13B1X00138050033

- 部位の状況によりガイド管に角度を付けて内視鏡用 穿刺針を誘導させることができます。 (細は把柄に、赤リングがついています。)
- 細 10343400
- 太 10343500



ELPS用スコープガイド管 洗浄管付

一般的名称:ガイド/内視鏡用レンズ洗浄具 届出番号:13B1X00138MK0382

● 内視鏡を任意の位置まで誘導し、鏡面及び患部を 洗浄することができます。